


# 酸蚀种植体

自攻丝、双螺纹、螺栓种植体，由4级纯钛制成  
酸蚀表面会使愈合过程更快，更有利于即刻负重操作

- 酸蚀处理至袖口底部。
- 双螺纹，旋入更快。
- 无需固定装置——使用特殊的SternTwist螺刀，利用其内部凹槽将种植体送入并旋入（见在骨中安装时的特殊手术程序）。
- 具有标准外六边形的常规（4.1mm）平台。
- 与Sterngold-ImplaMed的常规平台修复系列产品相兼容，与Branemark体系也相互兼容，可互换使用。
- 适用于上颌和下颌中的非旋转性单个和多个牙齿修复体。
- 与种植体和覆盖螺钉或与种植体、覆盖螺钉和底座（仅特殊订单）一同无菌包装。
- 三种直径：3.75、4.0和5.0mm。

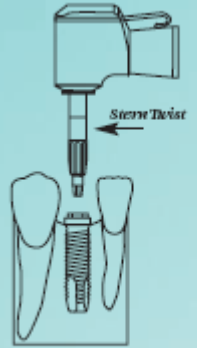

## SternTwist

介绍SternTwist...  
既简单又稳定的种植体安装程序!

- 内侧夹具/螺刀
- 易于使用、节约时间、非常精密
- 无需种植体底座
- 安装种植体和覆盖螺钉的一种工具
- 独特的可视性
- 在狭小空间内的机动性好
- 性价比高
- 具有 21mm 和 25mm 两种长度



### 操作和安装程序

在密实骨中，或安装的种植体的基牙与外六边形的外侧相配合时（即单个牙齿修复体），建议种植体用SternTwist进行部分安装。这样避免了内部键槽的剥落或可能对种植体外六边形造成的损坏。相反，应当在种植体上装配种植体底座，并且使用手术手柄中的种植体底座附件或棘轮扳手来完成安装。无论骨的质地如何，如果手柄的力矩已不足以继续旋转，将种植体底座附件装配到种植体上，并且使用棘轮扳手，以稳定的螺纹行程将种植体安装到正确的深度。



### 酸蚀种植体用 骨攻丝钻

- 特殊设计用于双螺纹酸蚀种植体。
- 具有 3.75mm、4.0mm 和 5.0mm 长度。

在骨中安装时的特殊手术注意事项:

- 以小于10RPM的速度用特殊的骨攻丝杆在骨窝部分制备出内双螺纹。
- 可跳过或缩减骨攻丝步骤，主要取决于在钻的过程中遇到的骨的密度和硬度。



访问[www.sterngold.com.cn](http://www.sterngold.com.cn)了解详情

电话: 010 88316400 传真: 010 88316401  
北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦 409 室